

תחזוקה מומלצת – מכשיר רנטגן Preva MIDMARK

תחזוקה שוטפת

לשם שמירה על בטיחות הציוד, יש לקיים תחזוקה שוטפת. על תכנית תחזוקה זו לכלול בדיקת תפקוד שנתית. בדיקה זו היא באחריות בעל המערכת, ועליו לוודא כי הצוות המבצע את הבדיקה הוא בעל ההכשרה וההסמכה המתאימה לבדיקה וטיפול במכשור הרנטגן מתוצרת MIDMARK.

ניקוי וחיטוי

ניקוי /

חיטוי

יש להשתמש באמצעי הגנה אישיים למניעת העברת זיהום.
יש לנקות את פני השטח של המערכת באמצעות מגבת לחה או חומר חיטוי שאינו מבוסס אלכוהול.

זהירות:

- אין לאפשר חדירת נוזלים למערכת האלקטרונית של המכשיר.
- אין לרסס נוזל ניקוי או חיטוי ישירות על המכשיר.
- למניעת העברת זיהום יש להשתמש בחסמי-זיהום ואמצעי הגנה הנדרשים במרפאות שיניים.
- יש לעקוב אחר הנחיות יצרן חומר החיטוי בשימוש בחומרי ניקוי או חיטוי.

באם אין שימוש בחסמי-זיהום חד-פעמיים המוחלפים בין הטיפולים, למניעת העברת זיהום, יש לעקוב אחר הנחיות הניקוי והחיטוי:

1. להסיר גורמי זיהום עיקריים מקונוס המכשיר, ידידות ראש הרנטגן וגוף המכשיר באמצעות מגבת חד-פעמית לחה ממים.
2. לייבש את הקונוס, הידידות וגוף המכשיר באמצעות מגבונים חד-פעמיים.
3. לנגב את הקונוס, הידידות וגוף המכשיר עם תכשיר חיטוי אנטי-חיידקי רחב-טווח בהתאם להנחיות השימוש של יצרן התכשיר.
4. לנקות את שאריות תכשיר החיטוי מהמערכת באמצעות מגבת חד-פעמית לחה ממים. צעד זה ימנע צביעה וקורוזיה של המכשיר.
5. ליבש את הקונוס, הידידות וגוף המכשיר עם מגבות נייר.

שיטות ניקוי

אזהרה: מערכת Preva Dental X-Ray אינה אטומה למים. יש להשתמש רק במגבות לחות, לא רוויות במים.